


Przed założeniem przyrządu do odprowadzania moczu UROPEN® należy wykonać następujące czynności:

- * sprawdzić kompletność części,
- * sprawdzić elementy, zwracając szczególną uwagę na uszkodzenia mechaniczne - w razie ich stwierdzenia przyrząd nie nadaje się do użytku.
- * sprawdzić zamknięcie zaworu spustowego worka (3c),
- * sprawdzić połączenie węża (3a), z łącznikiem (1a).

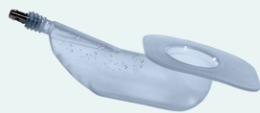

W porze dziennej (w czasie pracy, ruchu) zaleca się stosowanie worka do zbiórki moczu (3) o poj. 1,5 l i cewnika zewnętrznego UROCEV (1) w kolorze jasnoniebieskim.



Na noc zaleca się stosowanie worka do zbiórki moczu (3) o poj. 1,5 l i cewnika zewnętrznego UROCEV (1) w kolorze jasnozielonym.



Po założeniu cewnika UROCEV (1) na prącie a przed użyciem należy sprawdzić prawidłowość przylegania majteczek (2) i kołnierza cewnika (1b) do łona.



Zmontowany przyrząd UROPEN® należy nałożyć na prącie poprzez delikatne wprowadzenie prącia do części elastycznej cewnika zewnętrznego UROCEV (1).



Majteczki (2) należy ubrać mocując taśmami. Na biodrach należy zawiązać taśmę biodrową mocującą (2a), natomiast taśmę mocującą (2b) należy przełożyć do tyłu przez kroczę i zawiązać na uprzednio założonej taśmie (2a).



Worek do zbiórki moczu (3) należy zawiesić poniżej kolana i taśmami (4a i 4b) przymocować od strony wewnętrznej na łydce, odpowiednio dostosowując naciąg taśm. Przy jeździe samochodem zaleca się, aby worek (3) był zamontowany po stronie tylnej na łydce. Długość węża (3a) można dopasować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zaleca się aby wąż (3a) przebiegał pod udem.

Podczas przyjęcia pozycji leżącej (noc, relaks) zaleca się powieszenie worka (3) na uchwycie (5) w pozycji pionowej, zawsze ok. 15 cm poniżej poziomu ciała.

Podczas snu należy przyjąć pozycję na wznak lub na boku - nie zaleca się spania na brzuchu.

Podczas podróży (pozycja siedząca) należy zwrócić uwagę, aby wąż (3a) nie był załamany ani zagnieciony.

Nie należy nosić obcisłych spodni, które mogą utrudniać swobodny przepływ moczu z cewnika (1) przez wąż (3a) do worka (3).

Do opróżniania worka (3) należy używać zaworu spustowego (3c) znajdującego się w jego dolnej części. Po skończonej czynności należy pamiętać o jego zamknięciu.

UROPEN®

Przygotowanie do użycia

Użytkowanie